

口罩用户信息



警告事项

- 使用不当会有窒息的危险。
- 不要让儿童或需要帮助的人不受监督地使用口罩。
- 尚未进行身体负担大时的适应性测试。

限制条件

- 本口罩仅在新冠病毒大流行期间使用。
- 本口罩不是医疗设备。
- 本口罩未经 **CE** 一致性测试，仅供私人使用。
- 本口罩没有任何担保或保修。

使用方法（另见：“口罩功能说明”）

- 戴上口罩之前：
 - 检查口罩是否贴合，防止漏风。为了增加贴合的准确性，可以通过加热来调整鼻子区域的口罩。可以用吹风机等加热。为此，请加热相关部分，然后按紧。
 - 检查是否有缺陷或损坏。如果口罩状况不佳，请将其丢弃，请勿修理。
 - 确保阀门正确关闭（带阀门口罩）。
- 口罩只能由一个人使用。不要互相交换口罩。建议在口罩上标注自己的名字，明确归属。
- 下列情况下必须更换过滤器：
 - 过滤器的湿度过高并且呼吸困难，或者
 - 最晚 **8** 小时后。
- 如果戴着口罩感到不适，请立即摘下。
- 请勿清洁或重复使用过滤器，始终要更换新的过滤器。
- 过滤材料的选择和维护由用户自行负责。
- 使用后请务必对口罩进行消毒。